

Temblak i zawijany stabilizator stawu barkowego w kształcie litery Y BREIZH ORTHO®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PRZED UŻYCIEM WYROBU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ TREŚCIĄ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. W CELU ZAPEWNIENIA POPRAWNEGO DZIAŁANIA WYROBU KONIECZNE JEST JEGO PRAWIDŁOWE ZAŁOŻENIE.

OPIS

Temblak i zawijany stabilizator w kształcie litery Y umożliwiają unieruchomienie stawu barkowego. Zapięcia z rzepami Velcro są wygodne w użyciu i dają możliwość dobrania wyrobu do różnych rozmiarów. Opatentowana konstrukcja w kształcie litery Y ułatwia zakładanie temblaka i zawijanego stabilizatora stawu barkowego w kształcie litery Y.

Dostępne są trzy rozmiary:

Rozmiar 1: 65–90 cm.

Rozmiar 2: 90–120 cm.

Rozmiar 3: 120–135 cm.

WSKAZANIA

- Leczenie pooperacyjne po zabiegu chirurgicznym stawu barkowego i łokciowego.
- Uraz stawu barkowego i łokciowego.
- Uszkodzenie mięśni w obrębie stawu barkowego i łokciowego.
- Złamania kości ramiennej i przedramienia.

PRZECIWWSKAZANIA

Zaleca się, aby wyrób pierwszy raz założył pacjentowi członek personelu medycznego.

Środki ostrożności podczas stosowania wyrobu:

Nie stosować w żadnym innym celu niż wskazany.

Nie stosować u niemowląt.

U dzieci stosować wyłącznie pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej.

W razie wątpliwości zasięgnąć porady lekarza.

KONSERWACJA

- Prać ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego mydła.
- Nie stosować wybielacza.
- Dokładnie opłukać w celu usunięcia pozostałości środka myjącego.

- Nie prać w pralce ani nie suszyć w suszarce bębnowej.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.



OSTRZEŻENIA

- Z temblaka i zawijanego stabilizatora stawu barkowego w kształcie litery Y należy korzystać zgodnie z zaleceniami lekarza przepisującego te wyroby.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości bólowych, obrzęku, zmian czucia lub nieoczekiwanych reakcji podczas korzystania z wyrobu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

SKŁAD

- 45% poliestru
- 40% poliuretanu
- 15% bawełny



WYRÓB NIE ZAWIERA NATURALNEGO KAUCZUKU.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA

Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z informacjami.

1/ Przełożyć głowę i szyję przez otwór. a następnie umieścić przedramię na pasku. Dociągnąć pasek i przeprowadzić go ku przodowi z użyciem drugiej ręki (temblak i zawijany stabilizator stawu barkowego w widoku z przodu, z otworem i paskiem (A) i w widoku z tyłu, z paskiem w kształcie litery Y (B)).

2/ Zapiąć pasek w górnej części za pomocą rzepów Velcro (temblak i zawijany stabilizator stawu barkowego w widoku z przodu, z paskiem z zapiętymi rzepami Velcro (C) i w widoku z tyłu, z paskiem w kształcie litery Y (D)).

3/ Owinąć duży pasek unieruchamiający ramię wokół właściwego ramienia, a następnie przełożyć go pod przeciwległym („zdrowym”) ramieniem. Zapiąć pasek za pomocą rzepów Velcro (temblak i zawijany stabilizator stawu barkowego w widoku z przodu, z dużym paskiem owiniętym wokół ramienia (E) i w widoku z tyłu, z dużym paskiem owiniętym wokół ramienia (F)).

Gwarancja:

Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku korzystania z wyrobu w normalnych warunkach użytkowania opisanych w niniejszej instrukcji.

W przypadku wad materiałowych lub wykonawczych firma AMBELIO dokona naprawy lub wymiany całego wyrobu bądź jego części wraz z akcesoriami w okresie sześciu miesięcy od daty zakupu.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych:

W przypadku zastrzeżeń dotyczących usług i/lub jakości wykonania, danych identyfikacyjnych, oznaczeń, elastyczności, niezawodności, bezpieczeństwa, skuteczności i/lub jakości działania wyrobów firmy AMBELIO konsument (klient lub użytkownik) powinien zgłosić je przedstawicielowi handlowemu lub dystrybutorowi firmy AMBELIO. Przedstawiciel lub dystrybutor bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia powinien poinformować o nim kierownika ds. jakości w zakładzie producenta, korzystając z formularza zdarzenia. W formularzu zdarzenia należy zamieścić możliwie najbardziej szczegółowe informacje, takie jak dane identyfikacyjne wyrobu (nazwa, numer katalogowy, numer partii), informacje o naturze zgłoszenia bądź dokładny opis zdarzenia i jego konsekwencji dla pacjenta i/lub użytkowników oraz wszelkie informacje techniczne (wyrób, zdjęcia itp.) mogące ułatwić przeprowadzenie późniejszej analizy.

Usuwanie wyrobu:

Wyrób należy usuwać, przestrzegając środków ostrożności dotyczących usuwania odpadów komunalnych.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku zachowania zgodności z wytycznymi podanymi w tej ulotce z instrukcjami.

Uwaga: Pomimo użycia najnowocześniejszych technologii w celu uzyskania maksymalnej użyteczności, elastyczności, wytrzymałości i wygody stosowania niniejszego wyrobu nie można zagwarantować, że jego stosowanie nie spowoduje wystąpienia obrażeń ciała.

WYRÓB TEN JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU U JEDNEGO PACJENTA.

Należy zachować tę ulotkę z instrukcjami.



AMBELIO SAS
9 Aiguillage ZA de Beauséjour
35520 LA MEZIERE -France
Phone. : 02 99 67 09 08.



E-mail : contact@ambelio.com
Website : www.ambelio.com



IFU-AHIP. Version A – 09/11/2023



Avant l'utilisation, lire attentivement le mode
carefully prior to use



Lot n° : / Batch no.:




40°C Limite supérieure de température / Upper tei
104°F limit




BREIZH ORTHO

EN BREIZH ORTHO® Sling and Swathe Y-shaped shoulder splint

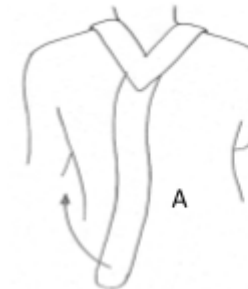

A

A

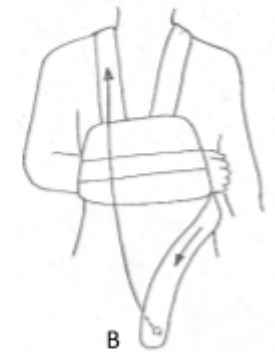


B



C



D

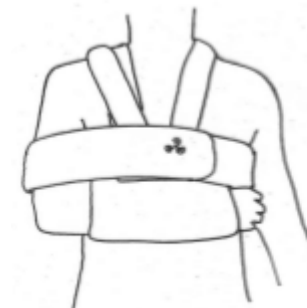

E



F