

PL

POLSKI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PRZED UŻYCIEM WYROBU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ TREŚCIĄ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. W CELU ZAPEWNIENIA POPRAWNEGO DZIAŁANIA WYROBU KONIECZNE JEST JEGO PRAWIDŁOWE ZAŁOŻENIE.

OPIS

Pas biodrowy do krioterapii ABDOHIP® łączy w sobie zalety terapii z użyciem długo działającego (do 1 godziny) zimnego wkładu i terapii uciskowej. W zestawie dostępne są dwa długo utrzymujące niską temperaturę wkłady chłodzące Freezsnow® (w tym zestaw zapasowy). Zakładanie pasa biodrowego i opaski bocznej jest wyjątkowo wygodne dzięki zapięciom z rzepami Velcro. Opaskę można umieścić na prawym lub lewym udzie pacjenta (w modelu obunożnym).

Dostępne są dwa rozmiary:

Rozmiar 1: 66–100 cm w talii.

Rozmiar A: 100–120 cm w talii.

Rozmiar 2: 120–140 cm w talii.

Pas biodrowy do krioterapii ABDOHIP® umożliwia stosowanie długo działającego, zimnego wkładu w połączeniu z dobraną do potrzeb pacjenta terapią uciskową o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym (zmniejszanie obrzęków). Wyrób ten można także stosować w obszarach, w których korzystne będzie działanie przeciwkrwotoczne. Jego stosowanie ułatwia rehabilitację pacjenta.

WSKAZANIA

- Leczenie pooperacyjne po alloplastyce stawu biodrowego.
- Uraz stawu biodrowego.
- Spadek napięcia mięśni ściany jamy brzusznej.
- Przewlekłe choroby stawu biodrowego.
- Ściętno udowe.
- Zabiegi z zakresu rehabilitacji sportowców.

PRZECIWWSKAZANIA

Krioterapii nie należy prowadzić u osób, u których występuje objaw Raynauda lub podobne dolegliwości prowadzące do skurczu naczyń, nadwrażliwość lub uczulenie na zimno, zapalenie stawów, zapalenie wielostawowe, cukrzyca, krieglobulinemia, osłabienie czucia powierzchniowego bądź zaburzenia krążenia obwodowego itp. Wyrób nie wolno zakładać bezpośrednio na skórę z podrażnieniami czy otarciami.

Zaleca się, aby wyrób pierwszy raz założył pacjentowi członek personelu medycznego.

Środki ostrożności podczas stosowania okładów chłodzących Freezsnow®:

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie otwierać ani nie przebijać. Nie dopuścić do połknięcia substancji znajdującej się wewnątrz wyrobu. Nie stosować w żadnym innym celu niż wskazany.

Nie wkładać mokrego woreczka do zamrażarki.

Nie wkładać woreczka do kuchenki mikrofalowej, piekarnika ani żadnego innego urządzenia wytwarzającego ciepło.

Nie stosować u niemowląt.

U dzieci stosować wyłącznie pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej.

Umieszczać wkład chłodzący bezpośrednio na skórze. Możliwe jest także przykładanie go do skóry przez warstwę odzieży.

Gdy stosowany jest wyrób uciskowy (pas, orteza itp.), nie stosować elastycznej opaski.

W razie wątpliwości zasięgnąć porady lekarza.

KONSERWACJA

- Prać ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego mydła.
- Nie stosować wybielacza.
- Dokładnie opłukać w celu usunięcia pozostałości środka myjącego.
- Nie prać w pralce ani nie suszyć w suszarce bębnowej.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.



! OSTRZEŻENIA

- Z pasa biodrowego ABDOHIP® należy korzystać zgodnie z zaleceniami lekarza przepisującego ten wyrób.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości bólowych, obrzęku, zmian czucia lub nieoczekiwanych reakcji podczas korzystania z wyrobu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

SKŁAD

Pas biodrowy:

- 55% nylonu
- 25% tworzywa Spandex (elastan)
- 20% poliamidu

Okład chłodzący:

- 85% nylonu
- 5% poliestru
- 10% polietylenu



WYRÓB NIE ZAWIERA NATURALNEGO KAUCZUKU.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA

Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z informacjami.

Co najmniej 4–6 godzin przed użyciem włożyć dwa wkłady chłodzące Freezsnow® do zamrażarki (w dostarczonym zamykanym woreczku).

Ważne: Przed zamrożeniem równomiernie rozłożyć granulaty żelowe; zamrozić wkład chłodzący po ułożeniu go płasko w celu późniejszego lepszego rozkładu niskiej temperatury. Po wyjęciu z zamrażarki odczekać od jednej do dwóch minut, a następnie ugnieść dłońmi wkład chłodzący.

Dzięki zastosowaniu unikatowej technologii we wkładach chłodzących Freezsnow® granulaty żelowe przyjmuje postać łatwo kształtowanego materiału przypominającego śnieg, który

długo utrzymujące niską temperaturę (bez ryzyka wystąpienia odmrożeń).

Po użyciu lub między użyciami wkłady chłodzące należy przechowywać w zamrażarce.

1/ Rozpiąć pas biodrowy, wyjąć wkład chłodzący z zamrażarki i niezwłocznie umieścić go po wewnętrznej stronie pasa, korzystając z zapięć z rzepami Velcro (A — po stronie lewej kończyny dolnej i B — po stronie prawej kończyny dolnej). Umieszcza się je z przodu i z tyłu.

2/ Założyć w talii pas z przymocowaną opaską w sposób, w jaki zamierza się go zamocować (C — lewa kończyna dolna).

3/ Pas biodrowy powinien być umieszczony zgodnie z rysunkiem: wkład chłodzący ma być umieszczony na stawie biodrowym, w górnej części uda (D).

Prowadzić sesje krioterapii w cyklach trwających 30 minut lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Gwarancja:

Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku korzystania z wyrobu w normalnych warunkach użytkowania opisanych w niniejszej instrukcji.

Dopuszczalna liczba użyć to maksymalnie 60 cykli.

W przypadku wad materiałowych lub wykonawczych firma AMBELIO dokona naprawy lub wymiany całego wyrobu bądź jego części wraz z akcesoriami w okresie sześciu miesięcy od daty zakupu.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych:

W przypadku zastrzeżeń dotyczących usług i/lub jakości wykonania, danych identyfikacyjnych, oznaczeń, elastyczności, niezawodności, bezpieczeństwa, skuteczności i/lub jakości działania wyrobów firmy AMBELIO konsument (klient lub użytkownik) powinien zgłosić je przedstawicielowi handlowemu lub dystrybutorowi firmy AMBELIO. Przedstawiciel lub dystrybutor bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia powinien poinformować o nim kierownika ds. jakości w zakładzie producenta, korzystając z formularza zdarzenia. W formularzu zdarzenia należy zamieścić możliwie najbardziej szczegółowe informacje, takie jak dane identyfikacyjne wyrobu (nazwa, numer katalogowy, numer partii), informacje o naturze zgłoszenia bądź dokładny opis zdarzenia i jego konsekwencji dla pacjenta i/lub użytkowników oraz wszelkie informacje techniczne (wyrób, zdjęcia itp.) mogące ułatwić przeprowadzenie późniejszej analizy.

Usuwanie wyrobu:


Wyrób należy usuwać, przestrzegając środków ostrożności dotyczących usuwania odpadów komunalnych.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku zachowania zgodności z wytycznymi podanymi w tej ulotce z instrukcjami.

Uwaga: Pomimo użycia najnowocześniejszych technologii w celu uzyskania maksymalnej użyteczności, elastyczności, wytrzymałości i wygody stosowania niniejszego wyrobu nie można zagwarantować, że jego stosowanie nie spowoduje wystąpienia obrażeń ciała.

WYRÓB TEN JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU U JEDNEGO PACJENTA.

Należy zachować tę ulotkę z instrukcjami.

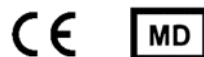

AMBELIO SAS
9 Aiguillage ZA de Beauséjour
35520 LA MEZIERE -France

Tél. : 02 99 67 09 08.

E-mail : contact@ambelio.com

Site internet : www.ambelio.com

IFU-AHIP. Version A – 08/11/2023




Avant l'utilisation, lire attentivement le mode d'emploi accompagnant le produit / Read instructions carefully prior to use

LOT

Lot n° : / Batch no.:



Limite supérieure de température / Upper temperature limit

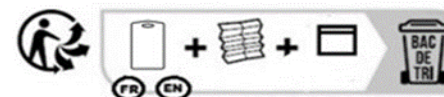

PL - Pas biodrowy do krioterapii **ABDOHIP®**

